

# Montage- und Bedienungsanleitung für Schiebegriff-Erhöhung

## MPB® SGE MPB und SGE WV-MPB 19, 20, bzw. 23


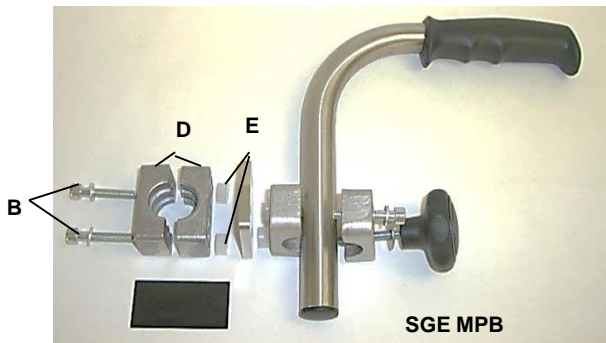


Abb. 1

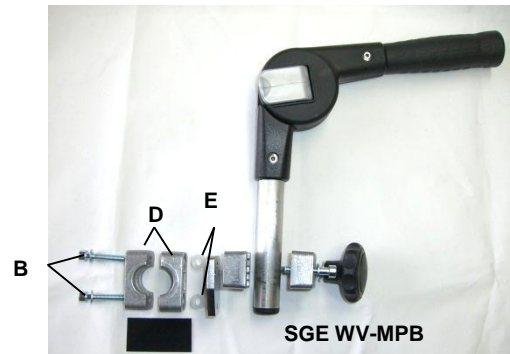

SGE WV-MPB

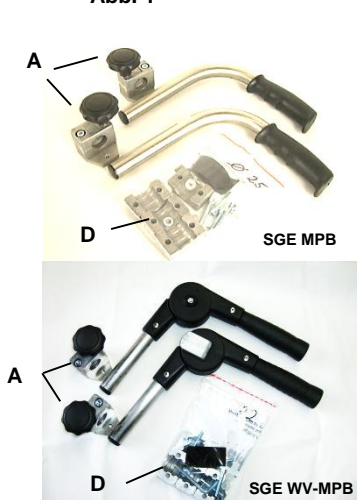


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Diese praktische Schiebegriffserhöhung ist bereits größtenteils vormontiert für Rohrdurchmesser 19, 20, bzw. 23 (Abb. 2).

1. Verbinden Sie als Erstes mit Hilfe der Inbusschrauben (B) die Kreuzkloben (Abb. 2 A) mit den beigegepackten Alu-Schellen (Abb. 1 + 2 D) vor den Griffen des Rollstuhls (Abb. 3 und 4). Wichtig sind hierbei auch die weißen Distanzhülsen (E), die in die Löcher der Alu-Schelle gesteckt werden, die durch die Inbusschrauben (B) mit der Metallplatte verbunden ist (Abb. 1). Damit die Alu-Schelle am Rohr nicht verrutschen kann, legen Sie bitte die ebenfalls beiliegende Gummischeibe zwischen Rohr und Schelle.



**Achtung:** Die Kreuzkloben müssen unbedingt auf dem zylindrischen Stück des Griffrohres montiert werden, um festen Halt sicherzustellen. Nicht im Bereich der Rohrbiegung anbringen! Nach 14 Tagen sämtliche Schrauben nachziehen!

2. Nun werden die Schiebegriffe am Kloben befestigt (Abb. 3 + 4). Durch das Feststellen der Inbusschraube im Kreuzkloben (A) und dem Handrad selbst (Abb. 3 C), können Sie eine auf Sie abgestimmte höhere, oder niedrigere Position der Schiebegriffe erreichen, indem Sie das Schiebegriffrohr entsprechend Ihrer Größe im Kloben positionieren.
3. Bei der Schiebegriffserhöhung SGE WV-MPB haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit durch Öffnen der grauen Kipphebel die Schiebegriffserhöhung abzuklappen, oder aber noch eine größere Höhe zu erzielen (Abb. 4 unten).



**Stellen Sie unbedingt sicher, dass alle Inbusschrauben, Aluminium – Befestigungsschellen und auch das Handrad vor Inbetriebnahme ausreichend fest angezogen sind.**



**Achtung:** Die Schiebegriff-Erhöhung ist nur zum Schieben und Lenken des Rollstuhles geeignet. Die Handgriffe dürfen nicht durch Tragen, extremes Kippen etc. belastet werden, da die Gefahr eines Rückenrohrbruchs am Rollstuhl durch den großen Hebelarm besteht. Das Ankippen des Stuhles darf daher nur über die Auftrittskappen und die Original-Schiebegriffe des Rollstuhls erfolgen, nicht über eine Belastung der Schiebegriffserhöhungen. Nicht an Leichtgewicht- / Alu-Rollstühlen verwenden! Die Bedienungsanleitung des Rollstuhl-Herstellers ist zu beachten.



**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.**

Diese Anleitung ist Bestandteil jeder MPB® Schiebegriffserhöhung SGE MPB und SGE WV-MPB 19,20,bzw. 23 und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.