

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

Produkt	Rohre	Armschalen
Unterarmgehstütze/UAG	eloxierte Alu-Legierung	modifiziertes Polyamid (PA6)

Art.Nr.	Bezeichnung (UAG=Unterarmgehstütze)	Ausführung	Griffhöhe von-bis cm	Armschale Achselhöhe von-bis/cm	Kapselgröße mm	max. Körpergewicht
100.20...	UAG/ECO 100	siehe Tabelle Seite 1	72,0-95,0	24,0	17	100 kg
100.22...	UAG/ECO 120	siehe Tabelle Seite 1	72,0-95,0	24,0	19	120 kg
101...	UAG/Magic-Twin	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0	19	130 kg
102...	UAG/Magic-Twin	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0	19	130 kg
103...	UAG/Magic-Twin	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0	19	130 kg
104...	UAG/Magic-Twin-Überlang	siehe Tabelle Seite 1	85,0-108,0	24,0	19	130 kg
105...	UAG/Magic-Soft	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0	19	130 kg
105.48	UAG/Magic-Natur (Korkgriff)	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0	19	130 kg
107...	UAG/Magic-Soft-Anatom	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0	19	130 kg
109...	UAG/Combi-Soft	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
110...	UAG/Comfort-Soft	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
112...	UAG/Comfort	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
115...	UAG/Combi	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
116...	UAG/Safe-In	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
117...	UAG/Safe-In Soft	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
118...	UAG/Safe-In Soft/anatomisch	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
119...	UAG/Safe-In/anatomisch	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	24,0-26,5	19	120 kg
120...	UAG/Light-Line	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	17,5-22,5	17	100 kg
120...10	UAG/Safe-In-Light	siehe Tabelle Seite 1	75,0-98,0	17,5-22,5	17	100 kg
122...	UAG/Fun-Kids	siehe Tabelle Seite 1	49,0-71,5	17,5-22,5	17	100 kg
122...10	UAG/Safe-In-Kids	siehe Tabelle Seite 1	49,0-71,5	17,5-22,5	17	100 kg

Zubehör					
160.10	Griffpolster, Standard				
161.10	Armschalenpolster, Standard				
162.10	Griffpolster, anatomisch				
163.10	Griffpolster, Mini				
165.00	Reflektor-Clip 22				
166.00	Eiskralle mit 5 Spitzen				
168.00.16	Big Foot Antirutschpuffer	PU -- mit Metalleinlage		16,0-17,5	
168.10.17	Big Foot Antirutschpuffer	PU -- mit Metalleinlage		18,5-20,5	
168.10.22	Big Foot Antirutschpuffer	PU -- mit Metalleinlage		22,0-24,0	

Wiedereinsatz

Die Produkthaftung bezieht sich **nur auf den Erstgebrauch** der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte. Sollte ein Produkt nach dem Erstgebrauch wiederholt ausgegeben werden, muss dies erst durch den Fachhandel bzw. Hersteller überprüft werden. Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Verweis auf Medizinproduktegesetz (MPG) und Betreiberverordnung (MPBetrBv).

Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer, der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte, beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **2 Jahre**. Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.

Gewährleistung

Auf die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine Garantie von **24 Monaten**. Hier von sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.



Bedienungsanleitung

BA-Nr.: 01.01.001/02-11



REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH
 D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
 Telefon: 05431/9416-0
 Telefax: 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
 e-mail: info@rebotec.de

Gehhilfen



Gruppe	1=Erwachsene 2=Jugend u. Damen 3=Kinder	Modelle	Artikel-Nr.	Verstellung-Clip	Verstellung-Druck	Quetschsystem	Abstellsystem	1-teilige-Armschale	verstellb. Armsch.	geschl. Armschale	Griff-Ergonom	Griff-Anatom	drehbarer Griff
		ECO 100	100.20...	X				X			X		
		ECO 120	100.22...		X			X			X		
		MAGIC-TWIN	101...	X			X	X			X		
		MAGIC-TWIN	102...		X	X	X	X			X		
		MAGIC-TWIN	103...	X		X	X	X			X		
		MAGIC-TWIN-Überlang	104...	X		X	X	X			X		
		MAGIC-SOFT	105...		X	X	X	X			X		
		MAGIC-NATUR	105.48		X	X	X	X			X		
1		MAGIC-SOFT-ANATOM	107...		X	X	X	X				X	
		COMBI-SOFT	109...		X	X			X		X		
		COMFORT-SOFT	110...	X		X			X			X	
		COMFORT	112...	X		X			X			X	X
		COMBI	115...	X		X			X		X		
		SAFE-IN	116...	X		X			X	X	X		
		SAFE-IN SOFT	117...	X		X			X	X	X		
		SAFE-IN-SOFT- ANATOM	118...	X		X			X	X		X	
		SAFE-IN- ANATOM	119...	X		X			X	X		X	X
2		LIGHT-LINE	120...	X		X			X		X		
		SAFE-IN-LIGHT	120...10	X		X			X	X	X		
3		FUN-KIDS	122...	X		X			X		X		
		SAFE-IN-KIDS	122...10	X		X			X	X	X		

Verwendungszweck


Die Gehhilfen sind für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert und dienen der Erhöhung der Gangesicherheit. Die Anwendung dieser Gehhilfen kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen. Beachten Sie dazu unbedingt die Sicherheitshinweise!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung der Gehhilfe einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!


Montageanweisung und Inbetriebnahme Höhenverstellung der Gehhilfen

Die Höhenverstellung erfolgt über ein teleskopierbares Alu-Rohr durch Clip- oder Druckknopf.

- Quetschverschraubung (A) durch Linksdrehung lösen.
- Druckknopf (B) in die Bohrung eindrücken bzw. Verstellclip (C) herausziehen.
- Alu-Rohr in die gewünschte Position verschieben.
- Druckknopf in die Bohrung einrasten bzw. Verstellclip einschnappen lassen.
- Quetschverschraubung (A) durch Rechtsdrehung festdrehen. (Durch das Festdrehen vermindern Sie die Geräuschbildung bei der Benutzung.)

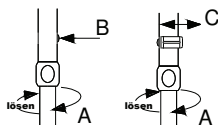

Anpassen der Armschale (Nur bei Modellen mit verstellbarer Armschale)

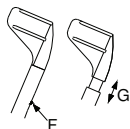


- Federbolzen (F) in die Bohrung eindrücken.
- Armschale (G) in die gewünschte Position verschieben.
- Federbolzen (F) wieder in die Bohrung einrasten lassen.

Abstelloptimierung der Gehhilfen (Nur bei Modellen mit Abstellsystem)



- Einfach zusammenstecken und steht!
- Optimierung der Abstellsituation.
- Kein Umfallen mehr.

Einstellen des Drehgriffes (Nur bei Modellen: Comfort und Safe-In-Anatom)

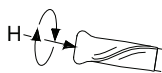

- Hülsenmutter (H) im Griff mit Schlüssel (SW 6) lösen
- Griff durch drehen in die gewünschte Stellung bringen
- Hülsenmutter (H) wieder fest anziehen

Hinweis! Bei Modellen mit weichem Griff ist das Anzugsmoment der Hülsenmutter zu überprüfen. Gegebenenfalls die Hülsenmutter mit einem Inbusschlüssel (SW 6) nachziehen.

Austausch der Saugkapsel

Eine abgenutzte oder beschädigte Saugkapsel (E) ist auszutauschen. Ziehen Sie die Saugkapsel vom Rohrende. Eine neue Saugkapsel (auf zugehörige Kapselgröße und Ausführung achten, siehe: Technische Daten) - aufschieben und den festen Sitz überprüfen.



Hinweis!

Achten Sie darauf, dass sich in der Saugkapsel ein Metallplättchen befindet. Es schützt davor, dass die Kapsel vom Rohr der Gehhilfe durchstoßen werden kann.

Die Folge könnte eine Beschädigung des Fußbodens sein. Risiko einer erhöhten Sturzgefahr durch Wegrutschen.

Pflege und Wartung

Bei den Rohren reicht in den meisten Fällen ein feuchtes Abwischen und anschließendes trockenreiben aus. Alle Kunststoffteile reinigen Sie mit einem handelsüblichen milden Kunststoffreiniger – Produktinformationen beachten.

Hinweis! Verwenden Sie keine lösmittelhaltigen oder öligen Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen. Bei Beschädigung oder Deformierung der Gehhilfe nicht weiterverwenden, sondern diese umgehend überprüfen lassen. Zur Durchführung einer Instandsetzung wenden Sie sich an einen Fachhändler.

Nur Original-REBOTEC Ersatzteile verwenden.

Lassen Sie Ihre Gehhilfe mindestens einmal jährlich von einem Fachhändler überprüfen.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximal zulässige Körpergewicht!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen.
- Lassen Sie sich beim Überwinden von Hindernissen zu Ihrer eigenen Sicherheit von einer Begleitperson unterstützen, damit diese Sie bei einem Fallen auffangen kann.
- Führen Sie beim Begehen von Treppen eine Hand am Geländer, die andere Hand stützen Sie auf der Gehhilfe ab.
- Sollten Sie doch einmal Stürzen: Lassen Sie die Gehhilfe möglichst seitlich fallen, damit Sie nicht auf die Gehhilfe fallen!



Achtung! Gefahr möglich: Sturzgefahr durch Wegrutschen

- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Die Gehhilfe muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher die Gehhilfe nie zu weit vom Körper entfernt auf.
- Benutzen Sie die Gehhilfe nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit.
- Die Gehhilfe darf keinesfalls zweckentfremdet werden. (z.B.: Aufstehhilfe, zum Hebeln, Versetzen von Möbeln)
- Es dürfen keine mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Haftung entfällt!).
- An der Gehhilfe keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) aufhängen.
- Die Gehhilfe nicht über längeren Zeitraum der Sonnenstrahlung aussetzen. (z.B.: am Fenster, an der Heizung, hinter einer PKW-Scheibe)
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehhilfe durch Fachpersonal überprüfen lassen.
- Gehen Sie niemals mit der Gehhilfe ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedecktem Untergrund.
- Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden.



Wichtiger Hinweis!

Damit sich der Patient im Umgang mit der Gehhilfe zu Recht findet, hat REBOTEC einen Info - Flyer erstellt.

Hier erhält der Patient in 10 Punkten Informationen zur Sicherheit, Gebrauch, Wartung und Pflege seiner Gehhilfe.

Geben Sie Ihrem Patienten, nach der Einweisung in die Benutzung der Gehhilfe, einen Info - Flyer mit damit mögliche Mängel und Schäden vermieden werden.

Info - Flyer erhältlich unter: BA-Nr.: D-01.01.067