

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

Produkt	Sitze	Sitzrohr	Fußkreuz
STAND UP-Standard	PUR	Stahl, beschichtet	Polyamid, schwarz
STAND-UP-Plus	PUR	Stahl, beschichtet	Polyamid, schwarz Aluminium, verchromt
SIT UP-Mini	PUR	Stahl, beschichtet	Polyamid, schwarz
SIT UP-Maxi	PUR	Stahl, beschichtet	Polyamid, schwarz

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Sitzhöhe von-bis	Sitzneigung nach vorne	max. Körpergewicht
315.10.00	Stehhilfe Stand UP	Standard	61,0-86,0 cm	15 Grad	150 kg
316.10.00	Stehhilfe Stand UP	Plus	57,0-82,0 cm	15 Grad	150 kg
317.10.00	Stehhilfe SIT UP	Mini	53,0-72,0 cm	15 Grad	150 kg
317.20.00	Stehhilfe SIT UP	Maxi	59,0-84,0 cm	15 Grad	150 kg

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
317.30.10	Rollensatz gebremst (5 Stück)	schwarz
317.30.20	Fünffach Fußkreuz	chromfarbig

Gewährleistung

Auf die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine Garantie von **24 Monaten**. Hier von sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

Hinweis !

[Betriebsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.](#)

Die identische Seriennummer in der BA ist auch auf dem Typenschild des Produktes aufgedruckt. Bei Beanstandungen oder Rückfragen geben Sie bitte Typ, Serien-Nr. und BA-Nr. an.



Betriebsanleitung

BA-Nr.: 01.04.039/11-09



REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH
 D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
 Telefon: 05431/9416-0
 Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
 e-mail: info@rebotec.de

Serien-Nr. /Produkt



Stehhilfen

**STAND UP
„Standard“**



**STAND UP
„Plus“**



**SIT UP
„Mini“**



**SIT UP
„Maxi“**



Verwendungszweck/Anwenderhinweise

Die Stehhilfen sind für Personen mit eingeschränkter Stehfähigkeit konzipiert und dienen zur Erhöhung der Standsicherheit, wie auch zur Entlastung der Beine und der Wirbelsäule. Des Weiteren sind Sie eine Hilfe für Patienten während der Anpassung von Orthesen.

Für die individuelle Sitzanfordernisse ist die Sitzhöhe und Sitzneigung einstellbar. Ein sicherer Stand gewährt das Fünffuß-Untergestell. Der Sattelsitz ist abwaschbar.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung der Stehhilfe einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!

Montageanweisung

Das Produkt wird nicht komplett montiert in der Verpackung angeliefert. Vor der Inbetriebnahme sind folgende Montagevorgänge durchzuführen:

1. Entnehmen Sie der Verpackung die vormontierten Bauteile (Sitz, Gassäule, Fußkreuz).
2. Stecken Sie zuerst die Gassäule in das Fußkreuz und dann den Adapter des Sitzes auf die Gassäule
3. Drücken Sie nun den Sitz kräftig in die Gassäule, so dass sich die Teile fest miteinander verkeilen.
4. Prüfen Sie den Festsitz und wiederholen gegebenenfalls den Vorgang zu Punkt 3.

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme der Stehhilfe sind folgende Handhabungen zu beachten:

Höhenverstellung

- Durch Betätigung des Auslöshebels für die Gasdruckfeder lässt sich die Stehhilfe in der Höhe verstellen.
- Setzen Sie sich hierzu auf die Stehhilfe und ziehen den Hebel nach oben.
 - Version: STAND UP-Standard Hebel hinten am Sattel
 - Version: STAND UP-Plus, SIT UP-Mini und Maxi Hebel links vom Sitz
- Die Stehhilfe hebt sich nun selbstständig in Ihre oberste Stellung. Durch die Sitzbelastung kann die gewünschte Höhe reguliert werden.
- Durch Loslassen des Hebels blockiert sich die Gasdruckfeder selbstständig.

Sitzneigungsverstellung

Version: StAND UP-Standard

- Unterhalb des Sattels befindet sich ein Inbusschlüssel (SW 6).
- Mit diesem Schlüssel lösen Sie die Schraube M8 am Sattelrohr und stellen die gewünschte Sattelneigung ein.
- Ziehen Sie die Schraube nach der Einstellung wieder fest an.

Version. STAND UP-Plus, SIT UP-Mini, Maxi

- Unterhalb des Sitzes befindet sich rechts der Hebel für die Verstellung der Sitzneigung.
- Durch Anheben des Hebels lässt sich der Sitz in die gewünschte Neigung drücken.
- Nach dem Loslassen des Hebels rastet der Sitz selbstständig ein.

Pflege

Alle Kunststoffteile reinigen Sie mit einem handelsüblichen milden Kunststoffreiniger – Produktinformationen beachten.

Bei dem beschichteten Stahlrohr reicht meistens ein feuchtes Abwischen und anschließendes Trockenreiben aus.

Beim verchromten Fußkreuz reicht ebenfalls ein feuchtes Abwischen und Trockenreiben aus.

Hinweis! Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen oder öligen Reinigungsmittel.

Die Stehhilfe zeichnet sich durch Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit aus. Sollte diese dennoch einmal Ihren Dienst versagen, weil z.B. die Gasdruckfeder ausfällt, beheben Sie den Mangel nicht selbst. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Fachhändler bzw. Sanitätshaus in Verbindung. Bei einer Instandsetzung des Produktes nur Original-REBOTEC Ersatzteile verwenden.

Lassen Sie Ihre Stehhilfe einmal jährlich von einem Fachhändler überprüfen.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz bestimmt. Der Wiedereinsatz (Lebensdauer) ist abhängig vom Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz ist bei dem Produkt eine Wartung durchzuführen und die entsprechenden Anweisungen zu Sicherheit, Pflege und Wartung sind zu beachten und einzuhalten.

Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen hier auf das Medizinproduktgesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **3 Jahre**.

Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.

Gewährleistung

Auf die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine Garantie von **24 Monaten**. Hier von sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.



Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximale zulässige Körpergewicht!**
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Stehhilfe auf Beschädigungen. Im Zweifelsfalle die Stehhilfe nicht in Betrieb nehmen.
- **Achtung-Sturzgefahr!** Beugen Sie sich beim Sitzen nicht zu weit nach vorne über.
- **Gefahr durch wegrutschen!** Vorsicht bei der Benutzung einer Stehhilfe mit Rollen auf feuchten Böden oder losen Teppichböden.
- Sorgen Sie bei der Benutzung der Stehhilfe für einen sicheren Stand.
- Nach längerer Nichtbenutzung die Stehhilfe durch einen Fachhändler überprüfen lassen.