

- **Schutz vor Eigenaggression**
z.B. Schläge gegen Kopf, Körper/Gegenstände
 - **Schutz vor Verletzungen anderer**
z.B. Schläge gegen Mitpatienten oder Pflegekräfte
-
- **Stark gepolstert**
 - **Reduziert die Greiffähigkeit**
 - **Erschwert das Ziehen von Sonden, Kathetern und Infusionen**
 - **Hand bleibt dennoch beweglich**



Beratung und Verkauf bei Ihrem Fachhändler



- Stegemannstraße 5-7 56068 Koblenz
- Tel: 02 61-1 33 88-0 Fax: 02 61-1 33 88-22
- Onlineshop: www.burbach-goetz.de
- E-Mail: info@burbach-goetz.de

9926 - 03/13

CarePlus

Schutzhandschuhe

für die erschwerte Pflege

suprima

Weitere CarePlus-Produkte:

Reißfester Overall
mit verschiedenen Verschluss-Systemen
Art. 4740 und Art. 4741

Reißfester Overall für Kinder
Art. 4744

Weitere Informationen und die Themenbroschüre erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter:
www.suprima-gmbh.de



suprima

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35 · 95460 Bad Berneck
Telefon 0 92 73 - 92 04 - 0
Telefax 0 92 73 - 92 04 - 55
info@suprima-gmbh.de
www.suprima-gmbh.de



In Zusammenarbeit mit Fachkräften und Pflegeeinrichtungen entwickelt.

www.suprima-gmbh.de


CarePlus

Schutzhandschuhe

für die erschwerte Pflege



Durch den lose eingenähten Innenhandschuh gleitet die Hand beim Greifen am Außenhandschuh ab.

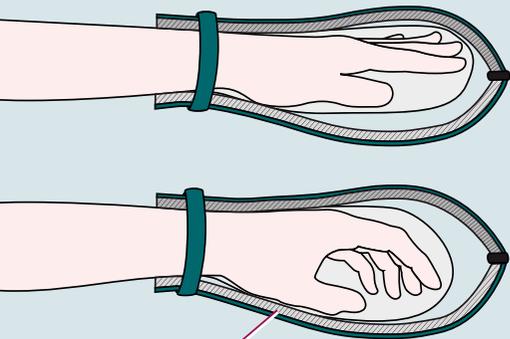

atmungsaktives 3D-Abstandsgewirke



Feststellband mit Sicherheitsverschluss

Tunnel zum Abdecken/Verbergen der Verschluss-Schnalle



Innenhandschuh:

- Wenig Handschweiß durch Feuchtigkeit ableitendes Material
- angenehmer Tragekomfort
- keine fixierte Handstellung



Material	100% Polyester	
Pflege	60° ✕ ✕ ✕ ✕	
Farbe	marine	
	normale Hände	große Hände
Größe	1	2
Artikelnr.	4831 020	

Hinweise zur richtigen Anwendung:



Überstreifen des Handschuhs bei gelockertem Band am Handgelenk




Festziehen des Bandes durch die Schnalle an der dünnsten Stelle am Handgelenk

VORSICHT: Darauf achten, dass keine Abschnürungen entstehen



WICHTIG! Rückschlaufen des Bandes zur Sicherung

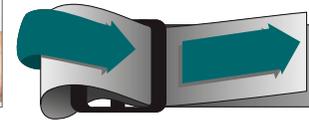

Schnalle in den Tunnel schieben

Warnhinweis:

Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Die Funktion des Handschuhs ist nur bei korrekter Anwendung und richtiger Größe gegeben. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden – daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen.